

Inicio del tratamiento

Liberty[®]

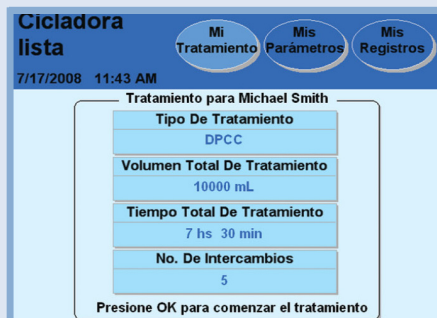
 united with stay•safe[®]

Fresenius Medical Care

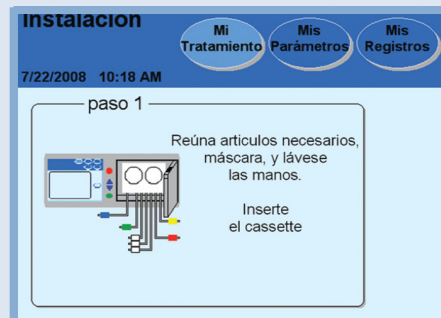
Esta ficha de procedimiento no intenta reemplazar el asesoramiento o la capacitación brindados por su médico o enfermera de DP. Consulte la Guía de usuario del ciclador Liberty para obtener información detallada sobre la descripción del dispositivo, instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. Con éste y todos los demás procedimientos de diálisis peritoneal, siempre mantenga la técnica de esterilización. Esta información se brinda únicamente a modo de referencia rápida. Siga las instrucciones como aparecen en las pantallas del ciclador Liberty. Espere sus indicaciones para pasar al paso siguiente.


1.

- Asegúrese de que el ciclador esté enchufado en un toma con descarga a tierra y coloque el botón de encendido en la posición Encendido.
- Si usa el sistema IQdrive, insértelo antes de encender el ciclador Liberty o cuando lo indique la pantalla.


2.

- Para hacer cambios en las opciones o elecciones de hardware, presione ahora Configuración.
- Regrese a la pantalla Listo y asegúrese de que la información de la receta sea correcta.
- Presione "OK" para comenzar el tratamiento.


3.

- Reúna los suministros.
 - Bolsas de solución (verifique S.C.A.L.E.)
 - Cassette del ciclador Liberty
 - Organizador stay•safe[®]
 - Tapas de stay•safe
 - Líneas o bolsas de drenaje
 - Desinfectante para manos
- Póngase una mascarilla y lávese las manos.


4.

- Antes de realizar la inserción, inspeccione los tubos del cassette y la película para verificar que no haya daños.
- Primero, inserte cuidadosamente la parte superior del cassette, luego presione la parte inferior hasta que encaje y cierre la puerta.
- Inserte el conector (gatillo) del PIN de la línea azul del paciente en el organizador stay•safe[®].
- Presione Siguiente.


5.

- Cuando se indique:
- Conecte la línea de color **ROJO** a la bolsa del calentador.
 - Conecte las líneas de color **BLANCO** a las bolsas de suministro adicionales.
 - Conecte la línea de color **VERDE** a la última opción de bolsa.
 - Conecte la línea de color **AMARILLO** a la línea o bolsas de drenaje.
 - Asegúrese de que la bolsa del calentador esté colocada uniformemente en la bandeja o calibrador del calentador.
 - Presione Siguiente.


6.

- Cuando se indique:
- Rompa los conos del calentador y las bolsas de la solución con los dedos o con una herramienta para "romper conos".
 - Incline el cono hacia adelante y hacia atrás hasta que se separe por completo.
 - Sujete con abrazadera las líneas que no se usen.
 - Presione Siguiente.

Inicio del tratamiento

Esta ficha de procedimiento no intenta reemplazar el asesoramiento o la capacitación brindados por su médico o enfermera de DP. Consulte la Guía de usuario del ciclador Liberty para obtener información detallada sobre la descripción del dispositivo, instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. Con éste y todos los demás procedimientos de diálisis peritoneal, siempre mantenga la técnica de esterilización. Esta información se brinda únicamente a modo de referencia rápida.



7.

- Verifique que todas las conexiones de las bolsas de solución coincidan con las de la pantalla.
- Presione Siguiente.
- En este momento, el ciclador enjuagará las líneas de solución/drenaje.



8.

- Verifique que la pinza de la línea de color azul para el paciente esté abierta.
- Presione Siguiente para imprimir la línea de color azul para el paciente.



9.

- Una vez finalizada la imprimación, inspeccione la línea de color azul para el paciente para asegurarse de que esté completamente llena de líquido.
- Presione Atrás para volver a hacer la imprimación, según sea necesario o cuando use el equipo integrado.
- Cierre la pinza de la línea de color azul para el paciente y presione Siguiente.



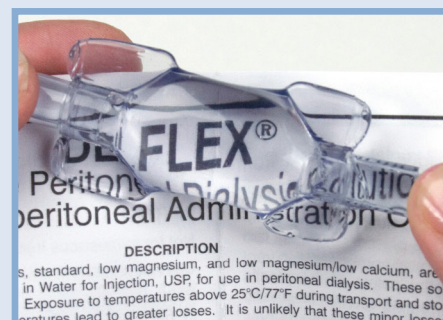
10.

- Ingrese Sí si llenó el abdomen con solución, sin usar el ciclador Liberty (intercambio manual).
- Ingrese el volumen de llenado de su intercambio manual. Presione Siguiente para continuar.
- Revise la configuración ingresada y luego presione Siguiente nuevamente.



11.

- Una vez conectado, abra el catéter y las pinzas de la línea de color azul para el paciente.
- Presione Siguiente para continuar.
- El tratamiento comenzará en este momento.



12.

- Durante el drenaje 0, mantenga la cámara de visualización en posición invertida para quitar el aire.
- Coloque la cámara de visualización frente a las palabras o números, según lo indicado por la clínica para controlar la transparencia del líquido.