

Démarrage du traitement


Cette carte de procédures n'est pas destinée à remplacer les conseils ou la formation de votre médecin ou de votre infirmière de DP. Veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur du cycleur Liberty PDX (P/N 480054-02) pour obtenir des informations détaillées sur la description de l'appareil, les instructions, les contre-indications, les avertissements et les précautions. Avec ces procédures comme avec toutes les autres procédures de dialyse péritonéale, observez toujours une technique aseptique. Ces informations tiennent uniquement lieu de références à consulter rapidement. Veuillez suivre les instructions telles qu'elles figurent sur les écrans du cycleur Liberty PDX. Attendez les invites pour passer à l'étape suivante. **Remarque:** Les illustrations sont uniquement présentées comme exemples.

1




- Assurez-vous que le cycleur est branché sur une prise murale mise à la terre.
- Si vous utilisez l'IQdrive™, insérez-le dans le port USB situé à l'arrière, sur le côté gauche du cycleur Liberty lorsque vous êtes face à celui-ci.
- Mettez en marche le cycleur Liberty PDX à l'aide de l'interrupteur d'alimentation blanc au dos du cycleur.

2

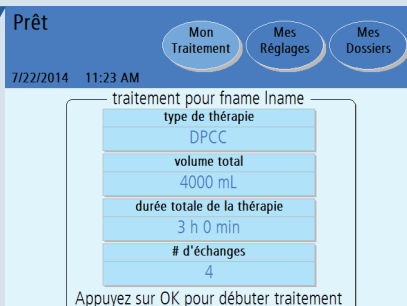

- Pour modifier le traitement, le patient, les options ou les choix de matériel, appuyez sur **Mes Réglages** pour effectuer ces modifications.
- Revenez à l'écran Prêt et assurez-vous que les informations de votre ordonnance sont correctes.
- Appuyez sur **OK** pour commencer le traitement.

3

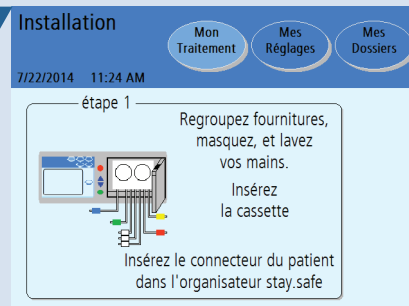


- Rassemblez les fournitures:
 - Sacs de solution (vérifiez la solution, la clarté, la quantité, des fuites, la date de péremption)
 - Cassette du cycleur Liberty
 - Organisateur staysafe
 - Bouchons staysafe
 - Ligne(s) de drainage ou sacs de drainage
 - Désinfectant pour les mains
- Mettez un masque et lavez-vous les mains

4



- Avant l'insertion, vérifiez que le tube et le film de la cassette ne sont pas endommagés.
- Commencez par insérer avec précaution la partie supérieure de la cassette, puis appuyez sur la partie inférieure jusqu'à ce qu'elle s'insère fermement et refermez la porte.
- Les lignes doivent pendre tout droit.
- Insérez le connecteur à broches (déclencheur) de la ligne bleue du patient dans l'organisateur staysafe.
- Appuyez sur **Suivant**.


5

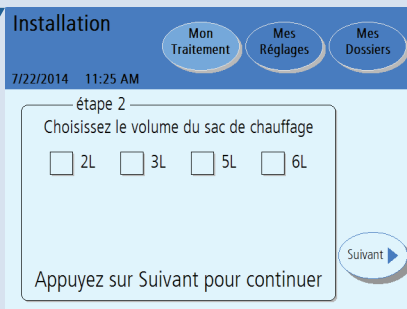

Lorsque vous recevez les indications suivantes:

- Sélectionnez le volume du sac de chauffage:
 - 2 l, 3 l, 5 l ou 6 l
- Le sac que vous utilisez pour votre sac de chauffage doit avoir un volume d'au moins 1000 ml de plus que votre premier volume de perfusion et d'au moins autant que votre volume de perfusion maximum.

6

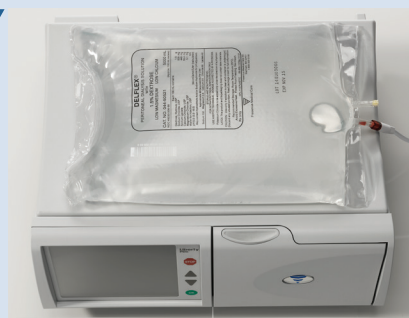

Lorsque vous recevez les indications suivantes:

- Raccordez la ligne **ROUGE** au sac de chauffage.
- Raccordez la ligne **VERTE** au dernier sac (optionnel) ou à un sac d'approvisionnement supplémentaire.
- Raccordez les lignes **BLANCHES** aux sacs d'approvisionnement supplémentaires.
- Raccordez la ligne **JAUNE** à la ligne de drainage ou aux sacs de drainage.
- Assurez-vous que le sac de chauffage est placé de façon uniforme sur le plateau de réchaud.
- Appuyez sur **Suivant**.

Démarrage du traitement (suite)

7



Lorsque vous recevez les indications suivantes:

- Cassez les cônes sur le sac de chauffage et les sacs de solution avec les doigts ou à l'aide de l'outil stay safe pour casser les cônes.
- Repliez les cônes d'avant en arrière jusqu'à ce qu'ils soient entièrement séparés.
- Utilisez un clamp sur les lignes non utilisées.
- Appuyez sur **Suivant**.

8

Installation

7/22/2014 11:26 AM

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

étape 4

Vérifiez les connexions des sacs. Appuyez sur Retour pour répéter le test de détection du sac.

Dernier sac	Sac 3	Sac 2	Sac 1	Sac de chauffage
-------------	-------	-------	-------	------------------

Appuyez sur Suivant pour continuer

Retour Suivant

- Le test de détection des sacs indique quelles lignes sont raccordées aux sacs de solution.
- Les sacs raccordés ont des lignes déclampées. Les sacs non raccordés ont des lignes clampées.
- Vérifiez que les sacs correspondent à ceux à l'écran.
- Appuyez sur **Suivant**.

9

Amorçage

7/22/2014 11:27 AM

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

étape 5

Assurez-vous que le clamp bleu est ouvert

Appuyez sur Suivant pour continuer

Retour Suivant

- Vérifiez que le clamp bleu de la ligne du patient est ouvert.
- Appuyez sur **Suivant** pour amorcer la ligne du clamp bleu du patient.

10

Amorçage Terminé

7/22/2014 11:27 AM

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

étape 6

Fermez le clamp sur la tubulure patient ou appuyez sur Retour pour amorcer de nouveau

Appuyez sur Suivant pour continuer

Retour Suivant

- Une fois l'amorçage terminé, examinez la ligne du clamp bleu du patient pour vous assurer qu'elle est entièrement remplie de fluide.
- Appuyez sur **Retour** pour lancer, au besoin, le réamorçage.
- Fermez le clamp de la ligne bleue et appuyez sur **Suivant**.



11

Échange Diurne

7/3/2014 10:28 AM

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

Entrez info d'échange manuel diurne

Y a-t-il eu un échange man. diurne?

Échange diurne OUI

Quantité de perf. après drainage?

Vol. perf. manuel 1000 mL

Appuyez sur Suivant pour continuer

Retour Suivant

- Saisissez **OUI** si vous avez rempli votre abdomen avec une solution sans utiliser le cycleur Liberty PDX (échange manuel).
- Saisissez le volume de perfusion de votre échange manuel. Appuyez sur **Suivant** pour continuer.
- Passez en revue les paramètres que vous venez d'entrer, puis appuyez de nouveau sur **Suivant**.

12

Prêt pour Traitement

7/22/2014 11:28 AM

Mon Traitement Mes Réglages Mes Dossiers

étape 7

Utilisez une technique aseptique pour brancher le tube bleu sur vous

Ouvrez le clamp du tube bleu et le clamp de votre cathéter

Appuyez sur Suivant pour continuer

Retour Suivant

- Une fois que vous êtes raccordé(e), ouvrez les clamps du cathéter et de la ligne bleue du patient.
- Appuyez sur **Suivant** pour continuer.
- Votre traitement va maintenant commencer.

Indications d'utilisation: Le cycleur Liberty de Fresenius Médical Care est destiné aux dialyses péritonéales aiguës et chroniques.

Attention: Selon la loi fédérale (des États-Unis), la vente de ce dispositif n'est autorisée que sur ordonnance ou par un médecin.