

# Anpassung der Ci-Ca<sup>®</sup> CVVHD-Behandlungsparameter

Postfilter *ionis.*  
Calcium [mmol/L]

Änderung der Citratdosis  
(Citrat/Blut)

> 0,40

Erhöhung um 0,2 mmol/L  
und Arzt informieren

0,35–0,40

Erhöhung um 0,1 mmol/L

0,25–0,34

Keine Änderung  
(typischer Zielbereich)

0,20–0,24

Reduktion um 0,1 mmol/L

< 0,20

Reduktion um 0,2 mmol/L  
und Arzt informieren

Systemisch *ionis.*  
Calcium [mmol/L]

Änderung der Calciumdosis  
(Calcium/Filtrat)

> 1,35

Reduktion um 0,4 mmol/L  
und Arzt informieren

1,21–1,35

Reduktion um 0,2 mmol/L

1,12–1,20

Keine Änderung  
(typischer Zielbereich)

1,00–1,11

Erhöhung um 0,2 mmol/L

< 1,00


Erhöhung um 0,4 mmol/L  
und Arzt informieren

Der Inhalt dieser Karte ist in keinem Fall als eine individuelle Therapieempfehlung zur Behandlung der Patienten anzusehen. Es obliegt daher der Verantwortung des diensthabenden Arztes die passenden Therapieeinstellungen zu wählen. Zusätzlich muss für die korrekte Anwendung von Medizinprodukten zu jeder Zeit die gültige Gebrauchsanweisung befolgt werden.

# Ci-Ca® CVVHD: Effekt von Blut- und Dialysatfluss auf den Säure-Basen-Status



Erwartete Bicarbonatkonzentration im Serum [mmol/L]

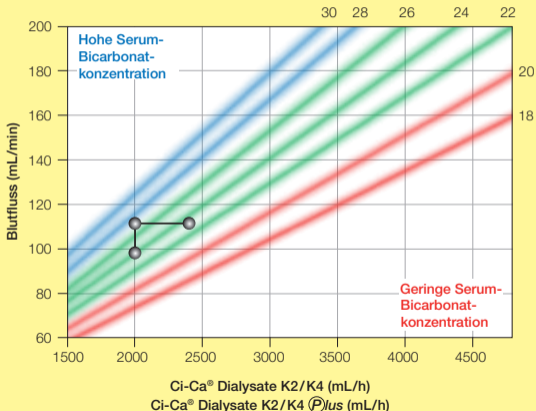

## Firmensitz:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH  
61346 Bad Homburg v. d. H. · Deutschland  
Telefon: +49 (0) 6172-609-0  
Fax: +49 (0) 6172-609-2191

## Deutschland:

Fresenius Medical Care GmbH  
Else-Kröner-Straße 1 · 61352 Bad Homburg v. d. H.  
Telefon: +49 (0) 6172-609-0  
Fax: +49 (0) 6172-609-8740  
E-mail: [marketing.deutschland@fmc-ag.com](mailto:marketing.deutschland@fmc-ag.com)

## Österreich:

Fresenius Medical Care Austria GmbH  
Lundenburgergasse 5 · 1210 Wien  
Telefon: +43 (0) 1-2923501  
Fax: +43 (0) 1-292350185  
E-mail: [fmc.austria@fmc-ag.com](mailto:fmc.austria@fmc-ag.com)

## Schweiz:

Fresenius Medical Care (Schweiz) AG  
Aawasserstrasse 2 · 6370 Oberdorf NW  
Telefon: +41 (0) 41-6195050  
Fax: +41 (0) 41-6195080  
E-mail: [info.ch@fmc-ag.com](mailto:info.ch@fmc-ag.com)  
[www.fmc-deutschland.com](http://www.fmc-deutschland.com)  
[www.fmc-austria.at](http://www.fmc-austria.at)  
[www.fresenius.ch](http://www.fresenius.ch)

F00005346 D (0,5 PUR-mt 08.13)

© Copyright 2013

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH  
Technische Änderungen vorbehalten