

ClearSurf

Oberflächendesinfektionsmittel für Dialysegeräte



ClearSurf

Oberflächendesinfektionsmittel für Dialysegeräte

ClearSurf ist dank seiner herausragenden Eigenschaften das ideale Mittel zur Desinfektion und Reinigung von Oberflächen von Dialysegeräten und anderen Medizinprodukten.

- Vaccinia- und BVD-Viren (als Surrogatviren für behüllte Viren wie HBV/HCV/HIV) werden mit einer 1%igen Lösung ClearSurf bereits nach 15 Minuten Einwirkzeit inaktiviert. Diese kurze Einwirkzeit macht ClearSurf zu einem idealen Oberflächendesinfektionsmittel zwischen zwei Dialysebehandlungen.
- ClearSurf besitzt zudem exzellente bakterizide und fungizide Eigenschaften.
- ClearSurf ist geruchlos sowie frei von Aldehyden und Phenolen. Die Wirkstoffe sind nicht flüchtig, die Raumluft wird daher nicht belastet. Im Umgang und Gebrauch ist ClearSurf sehr sicher.
- ClearSurf kombiniert hervorragende desinfizierende Eigenschaften mit einer kraftvollen, aber dennoch schonenden Reinigung.
- ClearSurf ist einfach in der Anwendung. Die nachfolgende Dosiertabelle ermöglicht eine genaue Dosierung der Anwendungslösung:

Volumen der Anwendungslösung	Gewünschte Konzentration der Anwendungslösung		
	0,25 %	0,5 %	1,0 %
	mL ClearSurf zu verwenden		
1 L	2,5	5	10
2 L	5	10	20
3 L	7,5	15	30
4 L	10	20	40
5 L	12,5	25	50
8 L	20	40	80
10 L	25	50	100
16 L	40	80	160
20 L	50	100	200
30 L	75	150	300

Anwendungskonzentration	0,25 %	0,5 %	1,0 %
Zur Desinfektion (gem. DGHM/VAH) sowie zur Reinigung			
Bakterien, Pilze (gem. DGHM/VAH)	4 h	1 h	15 min
Zur Inaktivierung von			
Behüllten Viren (Vaccinia- und BVD-Viren als Surrogatviren für z. B. HBV/HCV/HIV)	–	–	15 min
Rotaviren	15 min	–	–
Papova-/Polyomaviren	–	–	1 h
Feline Calciviren (Surrogatviren für Norwalk-like Viren)	–	–	2 h



Spezifikation

Zusammensetzung: 100 g ClearSurf enthalten:

Cocospropylen-diamin-guanidinium-diacetat	9,2 g
Benzalkoniumchlorid	16 g

Lagerung

Lagerbedingungen	+1°C bis +45°C
Haltbarkeit	3 Jahre ab Herstellung

Bestellinformation

Artikel	Einh./Karton	Sprachen	Art.-Nr.
ClearSurf*	6 x 2 L	D/F/NL/I	508 569 1
Dosierpumpe	1	–	603 063 1
Messbecher	1	–	603 062 1

*Kartons pro Palette: 40

Handhabung

ClearSurf wird zur Scheuer-/Wischdesinfektion verwendet. ClearSurf darf nur in der korrekten Anwendungskonzentration angewendet werden. Die Anwendungslösungen sind täglich frisch herzustellen. Das Behältnis muss nach jeder Entnahme von Desinfektionsmittel wieder dicht verschlossen werden. Stark verschmutzte Flächen dürfen zusätzlich nur mit Reinigern auf Basis von nicht-ionischen Tensiden behandelt werden (Kompatibilität ist zu beachten).

Literatur

1. Wille B, Arzt für Mikrobiologie, Infektionsepidemiologie und Hygiene, Gießen: Fachhygienisches Gutachten über die Eignung des Präparates ClearSurf als Mittel zur Flächendesinfektion, 10.1.2003
2. Schubert R, Institut für Hygiene und Umweltmedizin, Frankfurt (Main): Gutachterlicher Untersuchungsbericht zu mikrobiziden Eigenschaften des Präparates ClearSurf, 17.12.2002
3. Färber WU, Institut für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle GbR, Gießen: Untersuchungsbericht zur tuberkuloziden Wirksamkeit des Präparates ClearSurf, 10.1.2003
4. Steinmann J, Wiss. techn. Leiter der Mikrolab GmbH, Bremen: Hepatitis B-Wirksamkeit von ClearSurf im Antigentest, Untersuchungsbericht, 17.12.2002
5. Steinmann J, Wiss. techn. Leiter der Mikrolab GmbH, Bremen: Hepatitis C-Wirksamkeit von ClearSurf, Untersuchungsbericht, 10.2.2003
6. Steinmann J, Wiss. techn. Leiter der Mikrolab GmbH, Bremen: Vaccinia-Wirksamkeit, Untersuchungsbericht, 3.6.2005



Fresenius Medical Care

Deutschland: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-2191
Firmensitz: Else-Kröner-Straße 1 · 61352 Bad Homburg v. d. H.

Österreich: Fresenius Medical Care Austria GmbH · Lundenburgergasse 5 · 1210 Wien · Telefon: +43 (0) 1-2923501 · Fax: +43 (0) 1-292350185 · E-mail: fmc.austria@fmc-ag.com

Schweiz: Fresenius Medical Care (Schweiz) AG · Spicherematt 30 · 6370 Stans · Telefon: +41 (0) 41-6195050 · Fax: +41 (0) 41-6195080 · E-mail: info.ch@fmc-ag.com

www.fmc-ag.com