

ClearSurf

Oberflächendesinfektionsmittel für Dialysegeräte



Fresenius Medical Care

ClearSurf – Oberflächendesinfektionsmittel für Dialysegeräte

Anwendungskonzentration	0,25 %	0,5 %	1,0 %
Zur Desinfektion (gem. DGHM/VAH) sowie zur Reinigung			
Bakterien, Pilze (gem. DGHM/VAH)	4 h	1 h	15 min
Zur Inaktivierung von			
Behüllten Viren (Vaccinia- und BVD-Viren als Surrogatviren für z. B. HBV/HCV/HIV)	–	–	15 min
Rotaviren	15 min	–	–
Papova-/Polyomaviren	–	–	1 h
Feline Calciviren (Surrogatviren für Norwalk-like Viren)	–	–	2 h

Volumen der Anwendungslösung
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
8 L
10 L
16 L
20 L
30 L

Gewünschte Konzentration der Anwendungslösung		
0,25 %	0,5 %	1,0 %
mL ClearSurf zu verwenden		
2,5	5	10
5	10	20
7,5	15	30
10	20	40
12,5	25	50
20	40	80
25	50	100
40	80	160
50	100	200
75	150	300



Fresenius Medical Care

Deutschland: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v.d.H. · Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-2191

Firmensitz: Else-Kröner-Straße 1 · 61352 Bad Homburg v.d.H.

Österreich: Fresenius Medical Care Austria GmbH · Lundenburgergasse 5 · 1210 Wien · Telefon: +43 (0) 1-2923501 · Fax: +43 (0) 1-292350185 · E-mail: fmc.austria@fmc-ag.com

Schweiz: Fresenius Medical Care (Schweiz) AG · Spichermatt 30 · 6371 Stans · Telefon: 0800 850 580 · Fax: +41 (0) 41-6195081 · E-mail: info.ch@fmc-ag.com

www.fmc-ag.com