

Puristeril® 340

Kaltdesinfektionsmittel für Hämodialysegeräte




Puristeril® 340

Desinfektionsmittel für Hämodialysegeräte
auf Basis von Peressigsäure

Ausgezeichnete Wirksamkeit

- Puristeril® 340 besitzt die hohe Wirksamkeit eines Desinfektionsmittels auf Basis von Peressigsäure.
- Peressigsäure eignet sich wegen des außerordentlich breiten antimikrobiellen Wirkungsspektrums bei niedrigen Konzentrationen und kurzen Einwirkzeiten hervorragend zur Desinfektion.
- Puristeril® 340 zersetzt sich, indem folgende Abbaureaktionen stattfinden:

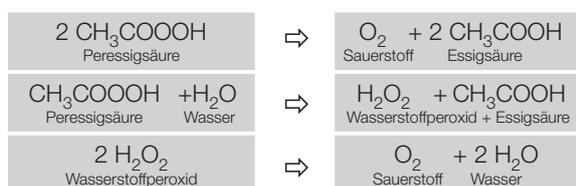

- Nach Gebrauch lässt sich Puristeril® 340 durch Spülen mit Wasser leicht entfernen.
- Wegen des niedrigen pH-Werts wird die erforderliche Entkalkung des Hämodialysegeräts problemlos erreicht.
- Puristeril® 340 ist geeignet zur Kaltdesinfektion. Prinzipiell kann es für alle Hämodialysesysteme, wie z. B. Hämodialysegeräte, Wasseraufbereitungsanlagen und Ringleitungen verwendet werden.

Spezifikation

Puristeril® 340 enthält Peressigsäure und Wasserstoffperoxid.

Desinfektion

Puristeril® 340 wirkt bakterizid, fungizid, sporizid, viruzid (inkl. HBV/HCV/HIV). Bei Gebrauch von Puristeril® 340 sind die Angaben der Gerätehersteller zu beachten. Puristeril® 340 kann in allen Fresenius Hämodialysegeräten der Generationen 2008, 4008 sowie des Therapiesystems 5008 als auch des GENIUS® Therapiesystems verwendet werden. Bei der Desinfektion von Wasseraufbereitungssystemen sind die Angaben der Hersteller zu beachten.



Nachweis von Desinfektionsmittelrückständen

Aus Sicherheitsgründen muss nach Beendigung der Desinfektion die Abwesenheit von Desinfektionsmittelrückständen überprüft werden. Die Abwesenheit von Puristeril® 340 wird mit Kaliumjodid-Stärkepapier durchgeführt (Art.-Nr. 508 521 3).

Stabilität und Lagerung

Ordnungsgemäß gelagert ist das Desinfektionsmittel 18 Monate ab Produktionsdatum voll wirksam. Behältnis stets verschließen und aufrecht lagern. In gut belüfteten Räumen bei 5 bis 25 °C aufbewahren. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Bestellinformation

Artikel	Menge	Art.-Nr.
Puristeril® 340	1 × 5 kg	508 562 1 (multilingual)
Puristeril® 340	1 × 10 kg	508 563 1 (multilingual)
Puristeril® 340 GENIUS®	1 × 3 kg	508 567 1 (multilingual)

Gutachten sind auf Anfrage erhältlich.



Fresenius Medical Care

Deutschland: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-2191
Firmensitz: Else-Kröner-Straße 1 · 61352 Bad Homburg v. d. H.

Österreich: Fresenius Medical Care Austria GmbH · Lundenburgergasse 5 · 1210 Wien · Telefon: +43 (0) 1-2923501 · Fax: +43 (0) 1-292350185 · E-mail: fmc.austria@fmc-ag.com

Schweiz: Fresenius Medical Care (Schweiz) AG · Spichermatt 30 · 6370 Stans · Telefon: +41 (0) 41-6195050 · Fax: +41 (0) 41-6195080 · E-mail: info.ch@fmc-ag.com

www.fmc-ag.com