

מידע אודות הגנת נתונים ופרטיות

הגנה על נתונים אישיים בעת שימוש במכשיר הדיאליזה הצפקית האוטומטית **sleep•safe harmony** לדיאליזה ביתית או בסביבה קלינית<sup>1</sup>

**1. נתונים אישיים במכשיר sleep•safe harmony**

הנתונים האישיים נשמרים במכשיר הדיאליזה הצפקית בהגדרה הראשונית וההתאמה האישית של המכשיר. נתונים אישיים כוללים אך אינם מוגבלים לנתוני טיפול ומידע רגיש אחר שעשוי לאפשר מסקנות לגבי בריאותו של המטופל. יש לוודא שמכשיר הדיאליזה הצפקית והנתונים הנשמרים בו מוגנים בכל עת מפני גישה של אנשים לא מורשים. ניתן ליישם זאת, לדוגמה, על ידי הנחת מכשיר הדיאליזה הצפקית בחדר שניתן לנעילה או חדר מפוקח שאינו נגיש לציבור, או על ידי נקיטת אמצעים מתאימים אחרים למניעת גישה בלתי מורשית לנתונים הנשמרים במכשיר.

כמוכן על כרטיס PatientCard<sup>Plus</sup> (כרטיס המטופל) המסופק עם מכשיר הדיאליזה הצפקית להיות מוגן מפני גישה של אנשים לא מורשים ולאחסן אותו במקום בטוח לאחר התאמה אישית וכאשר אינו בשימוש, שכן כרטיס זה מספק גישה למכשיר המטופל ולכן לנתונים טיפול המטופל. יש לשתף את כרטיס המטופל רק עם אנשים מורשים המעורבים בטיפול במטופל (כגון רופא המטופל).

**2. שימוש מורשה במכשיר sleep•safe harmony**

יש לאפשר רק למטופל ולאנשים המורשים לצפות בתצוגה ולקבל גישה למכשיר הדיאליזה הצפקית ולנתונים נשמרים בו. כדי לזהות פתיחה לא מורשית של מכשיר הדיאליזה הצפקית, המכשיר מצויד בחותמת אבטחה אחת (1) עם קוד QR בצד שמאל של התצוגה. יש לעיין באיור 1 עבור מיקום החותם ואיור 2 עבור דוגמה של החותם עם קוד QR. תמיד יש לוודא כי החותם שלם.



אם החותם חסר, פגום, או אם הוא נראה כאילו הוסר והודבק מחדש, יש לדווח על כך למרכז הדיאליזה באופן מידי, למרפאה או לרופא המטפל הרלוונטיים. באפשרותך גם לפנות למרכז השירות המקומי כי שמפורט בהוראות השימוש עבור מכשיר הדיאליזה הצפקית או לייצרן המכשיר, Fresenius Medical Care, בכתובת [DataProtectionOfficer@freseniusmedicalcare.com](mailto:DataProtectionOfficer@freseniusmedicalcare.com).

<sup>1</sup> הרישומים הבאים מסופקים על ידינו בתפקידנו כיצרן (Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, גרמניה) ואינן מהוות מדיניות פרטיות. הגוף האחראי להגנת מידע הוא המרפאה הרלוונטית, מרכז הדיאליזה או הרופא המטפל.

### 3. משלוח והובלה של מכשיר *sleep•safe harmony*

יש לשים לב למדיניות להגנת המידע והפרטיות המקומיות הרלוונטיות לטיפול בנתוני המטופל בעת הובלת מכשיר הדיאליזה הצפקית והכנה למשלוח. אם יש שאלות לגבי הגנת נתונים בעת משלוח או הובלה של מכשיר הדיאליזה הצפקית, יש לפנות למרכז הדיאליזה הרלוונטי, למרפאה, לרופא המטפל או למרכז השירות המקומי המפורט בהוראות השימוש של המכשיר. באמצעות מרכז השירות הטכני המקומי שלך, ניתן גם לארגן הסרה של נתונים על מדיית אחסון פנימית של מכשיר הדיאליזה הצפקית לפני החזרתו.

תמיד יש להסיר את כרטיס המטופל ממכשיר הדיאליזה הצפקית לפני האריזה, ויש לאחסן את כרטיס המטופל במקום מתאים ובטוח. אם כרטיס המטופל אינו נחוץ עוד למטופל, יש להחזירו למרכז הדיאליזה הרלוונטי, למרפאה, לרופא המטפל או למרכז התמיכה הטכני המקומי. על מפעילי האתר להקפיד על נהלי הגנת מידע והפרטיות המקומיים הרלוונטיים בעת טיפול או השלכה של הכרטיס.

#### **חשוב!**

אם יש חשד להפרת נתונים או אבדן נתונים עקב גישה לא מורשית, יש לדווח על כך למרכז הדיאליזה הרלוונטי, למרפאה או לרופא המטפל הרלוונטי. ניתן גם לפנות למרכז השירות המקומי המפורט בהוראות השימוש עבור מכשיר הדיאליזה הצפקית או היצרן Fresenius Medical Care, בכתובת [DataProtectionOfficer@freseniusmedicalcare.com](mailto:DataProtectionOfficer@freseniusmedicalcare.com).