

Prueba del ciclador Liberty[®] Select: guía de respuestas



Las respuestas correctas aparecen en **rojo**.

1. Seleccione todos los suministros necesarios para configurar el sistema del ciclador Liberty Select, comenzar el tratamiento y desconectar al final del tratamiento (seleccione todas las opciones que correspondan).
 - a. **Conjunto de ciclador Liberty**
 - b. **Vía de drenaje/bolsa de drenaje del ciclador Liberty**
 - c. **Organizador con clip stay•safe[®]**
 - d. **Bolsa(s) de solución DELFLEX[®]**
 - e. **Tapa nueva stay•safe**
 - f. Almohadilla térmica
 - g. Balanza
 - h. **Ciclador Liberty Select**
 - i. **Mascarilla**
 - j. **Desinfectante de manos**
2. Seleccione los colores de la barra de estado del ciclador Liberty Select con los que se requiere que interactúe con el ciclador (seleccione todas las opciones que correspondan).
 - a. Verde
 - b. **Azul**
 - c. **Amarillo**
 - d. **Naranja**
 - e. **Rojo**
3. Al insertar el casete en el ciclador Liberty Select, ¿cuál es la técnica adecuada que se debe usar?
 - a. Colocar en la abertura del casete, insertar la parte inferior del casete en la abertura, luego ingresar la parte superior del casete debajo de los pasadores de guía de metal.
 - b. **Deslizar las ranuras en la parte superior del casete hacia arriba y por debajo de los pasadores de guía de metal, luego insertar la parte inferior del casete detrás de la abertura del casete.**
 - c. Deslizar las ranuras en la parte superior del casete hacia arriba y por debajo de los pasadores de guía de metal, luego cerrar la puerta. El ciclador colocará la parte inferior del casete en su lugar cuando se cierre la puerta.
 - d. Colocar en la abertura del casete, insertar la parte inferior del casete en la abertura y luego cerrar la puerta. El ciclador colocará la parte superior del casete en su lugar cuando se cierre la puerta.
4. El casete se puede insertar cuando el ciclador está encendido o apagado.
 - a. Verdadero
 - b. **Falso**
5. La vía de la bolsa del calentador tiene la pinza de color _____, y la vía de drenaje tiene la pinza de color _____.
 - a. Verde, rojo
 - b. Verde, amarillo
 - c. Rojo, verde
 - d. **Rojo, amarillo**
6. En la pestaña Hardware (Accesorios) de My Settings (Mi configuración), ¿cuál de las siguientes opciones puede cambiar? (seleccione todas las opciones que correspondan).
 - a. **Volumen de la alarma**
 - b. **Pantalla en blanco**
 - c. Color de las barras de estado
 - d. **Brillo de la pantalla**

7. Si no puede cerrar la puerta sobre el casete, debe volver a revisar el casete para asegurarse de que se insertó correctamente.
- a. Verdadero
 - b. Falso
8. Al configurar el ciclador, ¿en qué punto las bolsas de solución deben estar conectadas asépticamente a las vías de solución?
- a. Tan pronto como se encienda el ciclador
 - b. Cuando el ciclador Liberty Select indique “Conectar vías de solución”
 - c. Antes de insertar el casete
 - d. Cuando pueda establecer la conexión
9. ¿Antes de qué pasos se colocaría la mascarilla y luego se lavaría las manos y usaría una técnica aséptica? (seleccione todas las opciones que correspondan).
- a. Conexión de las bolsas de solución a las vías de solución
 - b. Encendido del ciclador
 - c. Recolección de suministros
 - d. Conexión del equipo de extensión del catéter stay-safe a la parte de la vía del paciente del conjunto de ciclador Liberty
 - e. Desconexión del equipo de extensión del catéter stay-safe de la parte de la vía del paciente del conjunto de ciclador Liberty
10. Al configurar el ciclador, ¿qué volúmenes están disponibles para la bolsa del calentador? (seleccione todas las opciones que correspondan).
- a. 2 litros
 - b. 3 litros
 - c. 4 litros
 - d. 5 litros
 - e. 6 litros
11. ¿Cómo se salta una fase de su tratamiento?
- a. No puede saltarse ninguna fase de su tratamiento
 - b. Al presionar y mantener presionada la tecla OK durante cuatro segundos y presionar “Bypass” (Saltar) cuando aparezca en la pantalla
 - c. Al presionar y mantener presionada la tecla STOP (PARAR) durante cuatro segundos y presionar “Bypass” cuando aparezca en la pantalla
 - d. Solo se puede saltar cuando el ciclador está en reposo
12. Al verificar las bolsas de solución, ¿qué debe buscar?
- a. Concentración, claridad, cantidad, fugas, vencimiento
 - b. Color de la bolsa, vencimiento
 - c. Concentración, color, forma, olor
13. Si tiene tiempos de drenaje más largos de lo esperado, ¿qué debería hacer?
- a. Llamar a su vecino para obtener ayuda
 - b. Llamar a su enfermero de DP
 - c. Llamar al Servicio de Atención al Cliente de Fresenius Medical Care
 - d. Llamar a Asistencia Técnica de Fresenius Medical Care



14. ¿Qué sucederá si hay una falla de energía eléctrica durante el tratamiento?
- a. **Todas las vías se cerrarán automáticamente, la bomba se detendrá y la pantalla estará en blanco**
 - b. Sonará una alarma y aparecerá una pantalla de HELP (AYUDA)
 - c. Su tratamiento continuará porque el ciclador tiene una batería de reserva
15. El ciclador le avisará si la solución está demasiado caliente o demasiado fría para comenzar el llenado.
- a. **Verdadero**
 - b. Falso
16. ¿El uso de qué opción requiere conectar una bolsa de solución a la vía de la pinza verde?
- a. Porcentaje de salida del drenaje
 - b. Unidades del SI
 - c. **Opción de última bolsa**
 - d. Drenaje adicional
17. ¿Qué opciones de drenaje personalizables se encuentran en My Settings? (seleccione todas las opciones que correspondan).
- a. **Criterios de salida del drenaje**
 - b. Datos de salud del paciente
 - c. **Drenaje adicional**
 - d. **Alerta de flujo**
18. Si utiliza bolsas de solución de diferentes tamaños durante el tratamiento, la bolsa del calentador puede ser de cualquier tamaño.
- a. Verdadero
 - b. **Falso**
19. ¿Por qué se utiliza el organizador stay-safe?
- a. **Le ayuda a establecer la conexión entre el equipo de extensión del catéter stay-safe y la vía del paciente del conjunto de ciclador Liberty**
 - b. Verifica que todas las pinzas estén abiertas
 - c. Rompe el cono en las bolsas de solución
 - d. Evita que la solución drene
20. Puede encontrar una lista completa de notificaciones, alertas y alarmas que el ciclador Liberty Select puede producir en _____.
- a. **La guía del usuario de Liberty Select**
 - b. La guía de mano de Liberty Select
 - c. La tarjeta de procedimientos de Liberty Select
 - d. El folleto para insertar el casete de Liberty Select
21. La altura del ciclador Liberty Select debe ser _____.
- a. Nivelada con el piso
 - b. En posición plana sobre cualquier mueble del área de tratamiento
 - c. **No más de 12 pulgadas por encima o por debajo de la altura de la cama**

22. Un drenaje adicional es una opción preprogramada para realizar un drenaje adicional al final de su tratamiento (antes de un último llenado, si se lo indica el médico) y antes de desconectarse del ciclador.
- a. Verdadero
 - b. Falso
23. Si utiliza un ciclador Liberty Select con conectores de PIN dobles (2), debe utilizar primero el conector de PIN de la envoltura.
- a. Verdadero
 - b. Falso
24. Una vez que el tratamiento esté completo, pero antes de desconectarse del ciclador, usted puede:
- a. Realizar un drenaje STAT (Rápido) si es necesario eliminar más líquido
 - b. Ingresar datos de salud personales (presión arterial, pulso, temperatura, peso) en el ciclador
 - c. Revisar el resumen del tratamiento (tiempo total de tratamiento, UF total, volumen total) en el ciclador
 - d. Enviar un mensaje al enfermero de DP
25. Durante el tratamiento, si el ciclador Liberty Select detecta un flujo más lento de lo esperado durante el drenaje, el ciclador puede corregir el flujo lento por sí mismo sin realizar ninguna evaluación adicional del catéter de DP.
- a. Verdadero
 - b. Falso
26. Debe girar el botón azul 1/4 de vuelta en sentido horario y presionarlo para asegurarse de que el PIN se haya insertado en el conector del PIN antes de cerrar la pinza azul en la vía del paciente del conjunto de ciclador y la pinza blanca en el equipo de extensión del catéter.
- a. Verdadero
 - b. Falso
27. Si está usando una unidad USB para cargar los detalles de su tratamiento, verifique que _____ y _____.
- a. Esté correctamente insertado en la ranura de la parte posterior del ciclador Liberty Select
 - b. Se extraiga después de cada tratamiento
 - c. Se haya limpiado recientemente con agua y jabón
 - d. La opción de USB habilitado esté configurada en YES (Sí)
28. Al mover/transportar el ciclador Liberty Select, debe (seleccione todas las opciones que correspondan).
- a. Empujarlo con el pie
 - b. Tirar del cable de alimentación
 - c. Levantarlo por las manijas
 - d. Asegurarse de que la puerta del casete esté cerrada

