

Inicio rápido: Ciclador Liberty® Select

Primer uso

Asegúrese de que el ciclador esté conectado a un tomacorriente de pared, que el organizador stay•safe® esté conectado a la pestaña de montaje debajo de la pantalla, que se inserte la unidad USB opcional (también conocida como IQdrive™) y que se conecte el módem o la puerta de enlace Kinexus™ opcional.

✓	PASOS
	Recolección de los suministros.
	Preparación para el tratamiento.
	Encienda el ciclador.
	Compruebe la configuración del tratamiento.
	Presione OK para empezar.
	Póngase la mascarilla y, a continuación, lávese las manos.
	Abra el paquete del ciclador y tenga cuidado de no tocar la película del casete. Asegúrese de que no esté dañado.
	Abra la puerta para el casete e insértelo.
	Inserte el conector del PIN de stay•safe (vía del paciente con pinza azul) en el organizador stay•safe.
	Elija el volumen de la bolsa del calentador y presione SIGUIENTE.
	Retire la envoltura exterior de la bolsa de solución.
	Compruebe que las bolsas de solución cumplan con el principio S.C.A.L.E.
	Coloque las bolsas de solución sobre una superficie plana (sobre el ciclador).
	Lávese las manos.
	Conecte la vía con una pinza roja a la bolsa del calentador.
	Conecte las vías con pinzas blancas a las bolsas de solución adicionales si es necesario.
	Conecte la vía con una pinza verde a la bolsa de solución para la opción de última bolsa, si la opción está activada.
	Coloque la bolsa del calentador en la bandeja del calentador y mueva otras bolsas de solución conectadas a una superficie plana o al carro Liberty.
	Conecte la vía con una pinza amarilla a la vía o bolsas de drenaje. Presione Siguiente.



✓	PASOS
	Si utiliza una vía de drenaje, quite la tapa y coloque el extremo en el área adecuada para drenar.
	Rompa los conos en todas las bolsas.
	Sujete con las pinzas las vías no utilizadas.
	Presione SIGUIENTE.
	Verifique las bolsas conectadas.
	Presione SIGUIENTE.
	Una vez finalizado el lavado, asegúrese de que la pinza azul de la vía del paciente esté abierta.
	Presione SIGUIENTE.
	Compruebe la vía del paciente para asegurarse de que esta se ceba.
	Presione SIGUIENTE.
	Presione ATRÁS para cebar de nuevo (si es necesario).
	Cierre la pinza azul de la vía del paciente.
	Introduzca el volumen de intercambio manual diario; si lo hizo, luego presione SIGUIENTE. Confírmelo y presione SIGUIENTE.
	Conexión para el tratamiento (uso de una técnica aséptica)
	Coloque el conjunto de extensión del catéter en la ranura “Extensión” del organizador stay•safe.
	Límpiese o lávese las manos.
	Retire la tapa transparente del conector del PIN del organizador stay•safe.
	Retire el conjunto de extensión del catéter de la tapa.
	Conecte el conjunto de extensión del catéter al conector del PIN.
	Coloque la tapa transparente retirada del conector del PIN sobre la tapa usada y deséchela.
	Abra la pinza azul de la vía del paciente.
	Abra la pinza blanca del equipo del conjunto de extensión del catéter.
	Presione SIGUIENTE para iniciar el tratamiento.
	Finalización del tratamiento (uso de una técnica aséptica)
	Póngase la mascarilla y, a continuación, límpiese o lávese las manos.
	Coloque la nueva tapa de stay•safe en la ranura “Nueva tapa”.
	Gire el botón azul del conector del PIN un cuarto en el sentido de las agujas del reloj; luego, presiónelo. Verifique que el PIN esté completamente conectado.
	Cierre la pinza azul de la vía del paciente; luego, la pinza blanca del conjunto de extensión del catéter.
	Coloque el conector del PIN en el organizador.
	Coloque el equipo de extensión del catéter en la ranura Extension (Extensión) del organizador stay•safe.
	Retire la cubierta protectora de la tapa de stay•safe.
	Desenrosque el conjunto de extensión del catéter del conector del PIN y asegúrese de que el PIN esté en su lugar.
	Conecte inmediatamente el conjunto de extensión del catéter a la tapa de stay•safe.
	Retire el conjunto de extensión del catéter del organizador.



✓	PASOS
	Finalización del tratamiento (uso de una técnica aséptica) continuación
	Asegúrese el conjunto de extensión del catéter en el abdomen.
	Presione SIGUIENTE.
	Documentación de su tratamiento.
	Introduzca sus datos de paciente, si corresponde.
	Presione OK para guardar después de cada entrada.
	Revise el resumen del tratamiento y presione SIGUIENTE.
	Cierre todas las pinzas del conjunto del ciclador y la vía de drenaje/bolsas de drenaje.
	Presione SIGUIENTE.
	Abra la puerta del casete, retire el casete y luego cierre suavemente la puerta del casete.
	Deseche las bolsas de solución vacías, la solución no utilizada y los residuos según las instrucciones del personal de enfermería de terapia en el hogar.
	Presione SIGUIENTE.
	Apague el ciclador.
	Mantenimiento de la limpieza del ciclador
	Limpie el ciclador con un paño suave humedecido en una solución de 1:100 de agua con cloro u otro desinfectante para uso hospitalario. Enjuague las soluciones de limpieza con un paño humedecido en agua.

Lea las Instrucciones de uso para el uso seguro y adecuado de este dispositivo. Para obtener una descripción completa de los peligros, las contraindicaciones, los efectos secundarios y las precauciones, consulte la etiqueta completa en el paquete, en www.fmcna.com.

Indicaciones de uso

El ciclador Liberty Select está indicado para diálisis peritoneal aguda y crónica.

Precaución

La ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo por orden médica.

